

Control de glucosa en la sangre con Liberty

Guía para su prueba de glucosa en la sangre

Pasos simples para su prueba de glucosa en la sangre

Medidor, tiras de prueba y componentes del sistema



Pruebas de glucosa en la sangre



1

Lávese las manos con agua tibia y jabonosa.



2

Retire la tira de prueba del envase y ciérrelo de inmediato. Introduzca la tira de prueba en el puerto de prueba con extremo de contacto mirando hacia arriba. El medidor se activa.




3

Aplique la lanceta en el dedo.



4

Deje que se forme una gota de sangre, con la punta de la tira toque la parte superior de la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido.

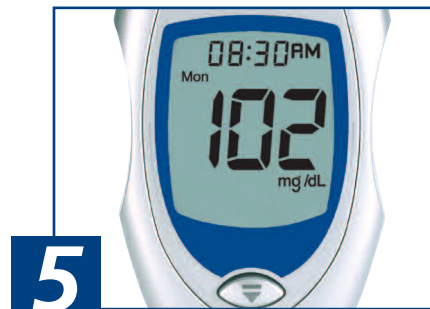

5

En tan sólo 4 segundos, se mostrará el resultado de la glucosa con la fecha y hora.



6

Sujete el medidor en posición vertical, con la tira de prueba mirando hacia abajo. Presione el botón de liberación para desechar la tira de prueba usada del medidor.

Esta guía proporciona una breve explicación general para realizar su prueba de glucosa en la sangre. Si necesita información sobre cómo configurar el medidor con la fecha y hora correctas, consulte la sección "Cómo empezar" de la libreta del propietario. Si necesita información más detallada sobre el procedimiento completo de las pruebas de glucosa en la sangre, consulte la sección "Pruebas de sangre" de la libreta del propietario. Para obtener ayuda con el uso del medidor de glucosa, llame a Liberty al 1-877-542-3610.